



全自动胶片式封片装置

Tissue-Tek[®] Film[™]

可快速、大批量地进行处理
是胶片封片领域的一大创新



Tissue-Tek[®] Film[™]

集合多种技术，实现高性能与便捷操作

1小时最多可封1090张的快速处理

最大处理能力为1090张/小时，封片速度约3秒钟/张，高效率的标本处理流程使处理速度大为提高。


处理后的载片被装入专用筐内(最多12筐)

处理后的载片被装入专用筐内，最多可容纳12筐(240张载片)。由于设备无须看管，所以还可以同时进行其他操作。



二甲苯注入量的指定控制管理

可以在操作面板上对指定的二甲苯注入量进行5档调节，气泡检测功能还能有效防止因二甲苯不导致标本干燥或封片不良。由于不需要开门，所以能将二甲苯污染控制在最小限度。

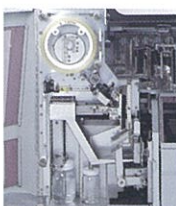

胶片不足的检测功能

胶片封片是以筐为单位完成的，所以设备不会因胶片不足而中途停止。优先确保标本保护功能的设计，使封片作业更为安全、可靠。

胶片使用宽度可进行4档设定

胶片的使用宽度可以进行4档设定，能根据标本的大小改变裁切尺寸，有助于减少浪费、降低成本。

一目了然的操作面板

操作面板的对话式界面，便于简便、准确地进行设定和确认。



内置二甲苯排放过滤器

作为确保操作场所安全的环保措施，内置活性炭过滤器可以减少二甲苯的污染。



设备参数	中文名称	自动盖片机
	英文名称	Tissue-Tek® Film™
	型号	Film-JC2
	形式	台式
	主机尺寸	720(W)×590(D)×690(H)mm
	主机重量	约75kg
	处理量	1090张/小时
	使用载玻片	25~26(W)×75~76(H)×0.9~1.2(D)mm
使用环境	胶片切割尺寸	45,50,55,60mm
	周围温度	10~40℃
	相对湿度	30~85%
配件	相对气压	70~106kpa
	二甲苯瓶(500ml)	1个
	二甲苯瓶盖	1个
	废液瓶(200ml)	1个
	废液瓶盖	1个
	染色篮筐(20片装)	10个
	封片胶带	1卷
	胶带切割刀	5把
	篮筐挂钩(20片装)	10个
	活性炭过滤器	2个


* 如《技术规范》已经进行了更改，不再另行通知。
对于最新情况，请参考仪器数据表。

Tissue-Tek 染色封片工作站

可以便捷地使用Tissue-Tek Film链接系统与染色机Tissue-Tek Prisma进行连接，从而实现染色到封片的自动化操作。

Tissue-Tek Film Link System: Code No.6134

仅用此链接系统即可将染色机与封片机连接为一体工作站。

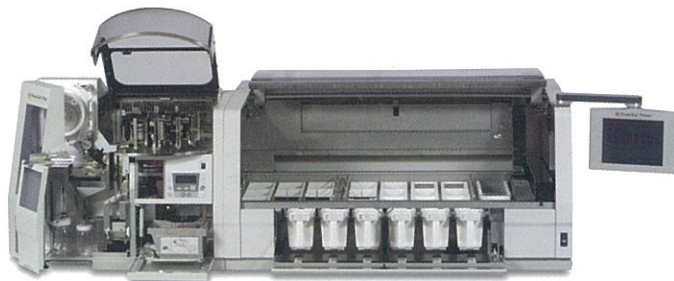

Tissue-Tek® Prisma™ & Film™
尺寸1970(W) x 720(D) x 690(H)mm



櫻花医療科技(泰州)有限公司

http://www.sakura-scn.com

总公司(物流/售服)
中国江苏省泰州市药城大道一号
中国医药城R09幢
电话: 0523-8620-1011
传真: 0523-8620-1022
邮编: 225300

北京分公司(营销支持/售服)
北京市朝阳区酒仙桥路10号
第85号楼3层301室
电话: 010-5975-6951
传真: 010-5975-6903
邮编: 100015

广州分公司(营销支持/售服)
广州市天河龙口东路34号
广州龙口科技大厦905室
电话: 020-8758-9906
传真: 020-8758-9965
邮编: 510635